

Upute za ispravnu uporabu kirurške maske

Higijenska dezinfekcija ruku




- Upotrijebite dovoljnu količinu sredstva za dezinfekciju.
- Pričekajte da prođe vrijeme djelovanja.
- Očistite sve dijelove šaka i ručnih zglobova.

U suprotnom će čitavo pakiranje biti kontaminirano!

Vađenje maske iz pakiranja



Stavljanje maske

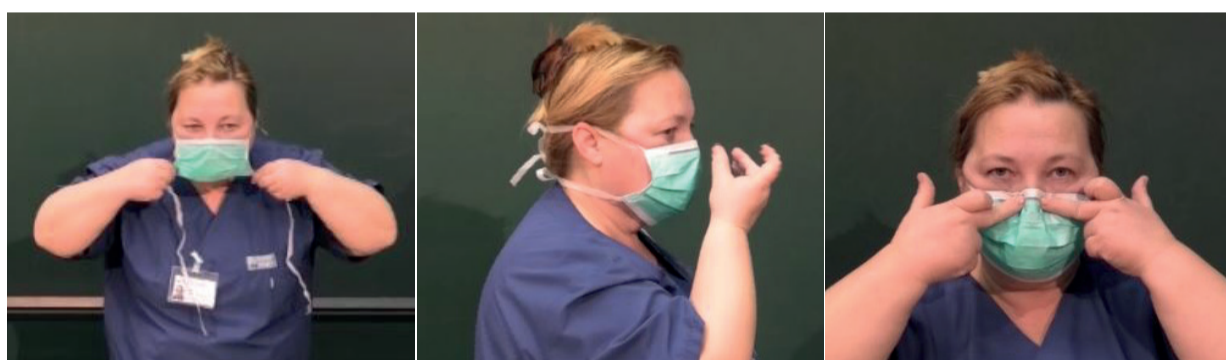

- Usta i nos potpuno pokrijte maskom.
- Pričvršćenje maske:
Model s vrpčama: pričvrstite gore na zatiljku i dolje na vratu.
Model s gumicom: pričvrstite iza ušiju.
- Držač pritisnite na gornji rub nosa tako da maska nasjedne dobro i sigurno.

Skidanje maske



- Higijenski dezinficirajte ruke.
- Otpustite vrpce odnosno skinite gumice.
- Masku skinite prema naprijed.
- Masku bacite u kantu za smeće s poklopcem i polugom za upravljanje stopalom
- Ponovno higijenski dezinficirajte ruke.

Potrebno je promijeniti položaj maske?



-> Prije i nakon svakog dodirivanja maske higijenski dezinficirajte ruke!

Razlozi za promjenu maske

Trajanje nošenja jedne maske različito je. Ovisi o radu i može varirati između nekoliko minuta i nekoliko sati.

Masku valja zamijeniti:

- ako je vlažna
- ako je kontaminirana izvana (krov, povraćeni sadržaj ...)
- nakon izlaska iz sobe ili područja za izolaciju
- prije ulaska u sobu za obrnutu izolaciju

Pozor

- Masku nemojte preklapati prema dolje i zatim ponovno stavljati.
- Masku nemojte nositi vezanu oko vrata.
- Nemojte nakratko pomaknuti masku u stranu kako biste nešto popili.

