

Ağız-Burun Koruyucu Ekipmanının (MSN) doğru kullanılması için bilgiler

Hijyenik el dezenfeksiyonu



- Yeterli miktarda dezenfektan kullanın
- Etki etme süresine uyun
- Tüm el ve dirsek bölgelerini dahil edin

Aksi takdirde ambalaj komple kontamine olur!

Ambalajından MSN'nin çıkarılması



MSN'nin takılması



- Ağız ve burun bölgesini MSN ile tamamen kapatın
- MSN'yi sabitleyin:
Şerit modeli: Ense bölgesinde üst ve boyun kısmından sabitleyin
Lastikli model: Kulakların arkasına sabitleyin
- Üst kenardaki askıyı burnunuza bastırın, MSN sıkı ve güvenli oturmalıdır

MSN'nin çıkarılması



- Hijyenik el dezenfeksiyonu
- Şeritleri çözün veya lastik şeritleri çıkarın
- MSN'yi önden çıkarın
- MSN'yi kapaklı ve pedallı bir çöp kovasına atın
- Yeniden hijyenik el dezenfeksiyonu

MSN pozisyonunun değiştirilmesi gerekirse?



-> MSN ile yapılan elle müdahalelerden önce ve sonra hijyenik el dezenfeksiyonu!

MSN değiştirme nedenleri

MSN'nin kullanım süresi değişkendir. Faaliyete bağlı olarak değişir ve birkaç dakika ile birkaç saat aralığında değişkenlik gösterebilir.

MSN şu şartlarda değiştirilmelidir:

- Nemlenmişse
- Dıştan kontamine olmuşsa (kan, kusmuk...)
- İzolasyon odasından veya bölgesinden çıktıktan sonra
- Koruyucu izolasyon odasına girmeden önce

Dikkat

- MSN'yi aşağıya doğru katlayıp ardından tekrar takmayın
- MSN'yi boynunuza dolayarak takmayın
- Bir şey içmek için MSN'yi kısa süreliğine yana kaydırmayın

