

Υποδείξεις σχετικά με την ορθή χρήση της χειρουργικής μάσκας

Απολύμανση των χεριών για λόγους υγιεινής



- Χρησιμοποιούμε επαρκή ποσότητα απολυμαντικού
- Τηρούμε τον απαιτούμενο χρόνο δράσης
- συμπεριλαμβάνουμε όλα τα τμήματα των χεριών και των καρπών

Διαφορετικά μολύνεται ολόκληρη η συσκευασία!

Αφαίρεση της χειρουργικής μάσκας από τη συσκευασία



Εφαρμογή της χειρουργικής μάσκας




- Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη πλήρως με τη χειρουργική μάσκα
- Ασφαλίζουμε τη χειρουργική μάσκα:
Μοντέλο με κορδόνια: τα σταθεροποιούμε επάνω στο πίσω μέρος της κεφαλής και κάτω στον αυχένα
Μοντέλο με ελαστικούς βρόγχους: τους ασφαλίζουμε πίσω από τα αυτιά
- Πιέζουμε το μεταλλικό στοιχείο στη ράχη της μύτης, έτσι ώστε η χειρουργική μάσκα να εφαρμόζει καλά και να παρέχει ασφάλεια

Αφαίρεση της χειρουργικής μάσκας



- Απολύμανση των χεριών για λόγους υγιεινής
- Λύνουμε τα κορδόνια ή αφαιρούμε τους ελαστικούς βρόγχους
- Αφαιρούμε τη χειρουργική μάσκα προς τα εμπρός
- Απορρίπτουμε τη χειρουργική μάσκα στον ειδικό κάδο απορριμάτων με καπάκι και πεντάλ
- Εκ νέου απολύμανση των χεριών για λόγους υγιεινής

Είναι απαραίτητη η αλλαγή της θέσης της χειρουργικής μάσκας;

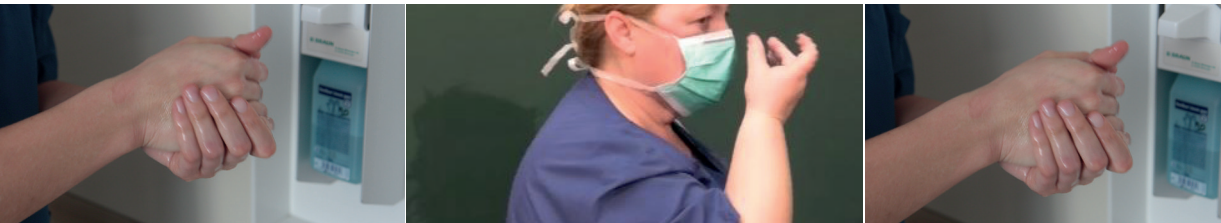

-> Απολύμανση των χεριών για λόγους υγιεινής πριν και μετά από κάθε επαφή με τη χειρουργική μάσκα!

Λόγοι για αλλαγή της χειρουργικής μάσκας

Η διάρκεια της χρήσης της χειρουργικής μάσκας ποικίλλει. Εξαρτάται από τη δραστηριότητα και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ λίγων λεπτών και πολλών ωρών.

Η χειρουργική μάσκα πρέπει να αλλαχθεί:

- εάν βραχεί
- εάν μολυνθεί από έξω (αίμα, εμετός ...)
- μετά την έξοδο από δωμάτιο απομόνωσης ή θάλαμο απομόνωσης
- πριν από την είσοδο σε δωμάτιο προστατευτικής απομόνωσης

Προσοχή

- Η χειρουργική μάσκα να μην μετακινείται προς τα κάτω και μετά να εφαρμόζεται εκ νέου
- Η χειρουργική μάσκα να μην φοριέται δεμένη γύρω από τον λαιμό
- Η χειρουργική μάσκα να μην παραμερίζεται για λίγο για να πιούμε κάτι

